

Jak pobrać materiał genetyczny do testu DNA ?

Zestaw do pobrania próbek DNA zawiera po 2 sztuki sterylnych patyczków wymazowych (po 1 parze dla dziecka i ojca) i umożliwia szybkie i łatwe pobranie wymazu (komórek) z wewnętrznej strony policzków . Pobranie próbek DNA trwa kilka minut i jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne.

Ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcją i odesłać próbki DNA wraz z wypełnionym i PODPISANYM formularzem w zaadresowanej kopercie zwrotnej którą znajdziesz w naszej przesyłce .

INSTRUKCJA :

1. Nie pij kawy ani herbaty oraz nie pal na 4 godziny przed pobraniem wymazu. Próbki zawierające pozostałości kawy, herbaty i tytoniu powodują błędy w testach DNA !
2. Umyj ręce i przepłucz usta trzy razy ciepłą wodą. (w przypadku niemowląt - pozwalaj im pić wodę z butelki lub czekaj 2 godziny od ostatniego karmienia)
3. Wyjmij z opakowania sterylnego pierwszą parę patyczków wymazowych , które mają być wykorzystane do pobrania próbki DNA ojca . Uważaj żeby nie dotykać końcówki patyczków (tam gdzie są waciki) ! Zbieraj wymaz z wewnętrznych stron obu policzków pocierając końcówki patyczków o błonę śluzową około 30 razy i przez około 1 minutę. Zbieraj wymaz z max dużej powierzchni jamy ustnej .
4. Powtórz ten cały proces z drugim patyczkiem wymazowym. Musisz dostarczyć nam dwa patyczki na 1 osobę.
5. Pozostaw wymazy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej przez kilka minut. Aby uniknąć zanieczyszczenia pozostaw je na sterylnej i czystej chusteczce higienicznej
6. Pobrane próbki (patyczki z wymazem) włóż do pierwszej koperty do przechowywania próbek (nie wkładaj ponownie do plastikowego opakowania z którego je wyjąłeś !) . **Wypełnij czytelnie dane na kopercie i podpisz się poniżej !** . Zaklej dokładnie kopertę.
7. Wyjmij z opakowania sterylnego drugą parę patyczków wymazowych , które mają być wykorzystane do pobrania wymazu z DNA od dziecka i powtórz cały proces pobierania wymazu z ust (kroki 3-5).
8. Pobrane próbki (patyczki z wymazem) włóż do drugiej koperty do przechowywania próbek (nie wkładaj ponownie do plastikowego opakowania z którego je wyjąłeś !) . **Wypełnij czytelnie dane na kopercie i podpisz się poniżej !** . Zaklej dokładnie kopertę
9. Na koniec włóż dwie mniejsze , **podpisane** koperty z próbkami DNA ojca i dziecka oraz **wypełniony i podpisany formularz !!!** do większej koperty z naszym adresem zwrotnym i wyślij na pocztę . Doradzamy wysłanie listu poleconego lub przesyłki rejestrowanej.

UWAGA !!!

Do przeprowadzenia badań niezbędne są podpisy na Formularzu „Sample Documentation and Consent Form” oraz na kopertach z próbkami !!! Podpisuje się ojciec i dziecko jeśli ukończyło 16 lat . Jeśli dziecko nie ma skończonych 16 lat podpisuje się za niego ojciec !!!